

SLL8S, SLL16S

LLAMADORES PARA SALAS DE ENFERMERIA



INDICACIÓN DE LLAMADA

Uno o dos dígitos por habitación
 Tipo: Leds rojos de 7 segmentos de 25 mm de altura
 Visibilidad: 10 m.
 Audio: con volumen y cadencia regulables

ENTRADAS PARA CADA PUNTO

Pulsador de llamado en habitación
 Pulsador de apagado (o reconocimiento) en habitación
 Pulsador de borrado en llamador
 Tipo de pulsador: NA.

SALIDAS PARA CADA PUNTO

Indicación numérica seleccionable de 00 a 99
 Indicación de llamado en dintel de habitación
 Indicación de enfermera presente en dintel
 Luces: lamparita de 24 Vcc, 3 W ó Led con 47 kOhm, 0,5 W

FUENTE PARA LUCES Y PULSADORES

24 Vcc @ 15 W
 Simultaneidad: cinco llamados

ALIMENTACIÓN

220 Vca \pm 15 %, 50 Hz.
 Consumo menor a 35 VA

MODELO


SLL8S, ocho salas.
 SLL16S, dieciséis salas.

PESO

SLL8S, 3,3 kg.
 SLL16S, 3,5 kg.

GABINETE

PVC gris con frente en acrílico color humo.

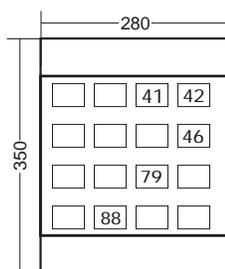

Medidas en mm
 Profundidad 100 mm

Rev 1.3

21/08/08

FABRICADO EN URUGUAY

DESCRIPCIÓN

Llamador para salas de enfermería con indicación numérica y sonora.
 Para el apagado o reconocimiento del llamado requiere que la enfermera concorra a la habitación.

FUNCIONAMIENTO

Dispone de dos modos de funcionamiento, modo básico o de dos etapas con llamado y apagado en habitación y alternativo o de tres etapas con llamado y reconocimiento en habitación y apagado en llamador.

El modo de funcionamiento se selecciona con conexiones internas.

El modo de tres etapas requiere una botonera con un pulsador para cada llamado junto al llamador.

Modo básico, dos etapas

En cada habitación hay dos pulsadores, el de llamada y el de apagado.

Funcionamiento Etapa 1: El paciente llama a la enfermera, se enciende el número de habitación, luz de dintel y el audio. Etapa 2: la enfermera concurre a la habitación oprime el pulsador de apagado, en la habitación se apaga la luz del dintel, en el llamador se apagan el número y el audio.

Modo alternativo, tres etapas

El pulsador de apagado pasa a ser de reconocimiento y se agrega un indicador luminoso en el dintel y un punto en el llamador, ambos indican enfermera presente en habitación. También se agrega un pulsador de apagado por cada punto junto al llamador, accesorio *ADSLL8S* o *ADSLL16S*

Funcionamiento Etapa 1: El paciente llama a la enfermera, se enciende el número de habitación, luz de dintel y el audio. Etapa 2: la enfermera concurre a la habitación oprime, el pulsador de reconocimiento, en la habitación se apaga la luz de llamada del dintel y se enciende la luz de enfermera presente del dintel, en el llamador se apaga el número, se enciende el punto y se apaga el audio.


Etapa 3: cuando la enfermera vuelve a la sala de enfermería oprime el pulsador de apagado en el accesorio *ADSLL8S* o *ADSLL16S* y se apagan todos los indicadores.

INSTALACIÓN

Pueden colocarse pulsadores en el baño en paralelo con el de llamado y luz de dintel interna para confirmación de llamada en paralelo con la luz de dintel.

En modo básico se requieren dos o tres conductores de señal y un común por habitación.

En el modo de tres etapas se requieren 4 conductores de señal y un común por habitación

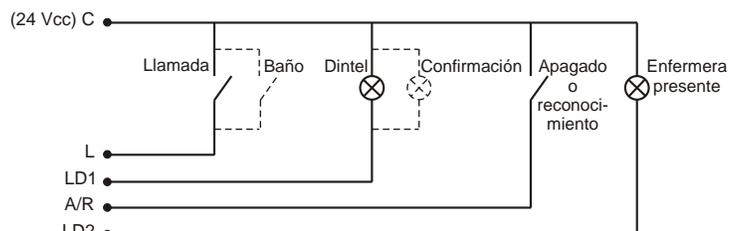

Tel.: +598 2 622 0651
 Fax: +598 2 622 2048
 info@controles.com
 www.controles.com

CONTROLES S.A. Av. Rivera 3314
 C.P. 11300 - Montevideo - URUGUAY